

LABORATORIO DE VIROLOGÍA CLÍNICA					
TIPO DE MUESTRAS	RECOLECCIÓN	CONSERVACIÓN	OBSERVACIONES	HORARIOS DE RECEPCIÓN	CRITERIOS DE RECHAZO
Secreciones Respiratorias	Más de 3 ml en tubo nuevo estéril seco con tapa a rosca.	Heladera (2-8 °C)	No se reciben muestras en sondas	Lunes a viernes las 24 hs sábados, Domingos y Feriados de 8 a 19 hs	Ver IT Criterios de aceptación y Conservación de muestras
Hisopado Nasofaríngeo	Hisopo de dacrón, rayón, poliéster o nylon de cabeza pequeña con mango flexible de plástico o de aluminio, en tubo nuevo estéril seco con tapa a rosca.	Heladera (2-8 °C)			
Lavado broncoalveolar. lavado bronquial, aspirado traqueal	Al menos 1 ml en tubo nuevo estéril seco con tapa a rosca.	Heladera (2-8 °C)			
Sangre entera	Tubo de 7 ml de sangre entera (tubo tapa lila) con EDTA como anticoagulante.	Heladera (2-8 °C)	No se reciben muestras coaguladas.		
Tarjeta de screening neonatal	Al menos un pocillo completo.	T.ambiente			
Orina	Más de 3 ml en frasco nuevo estéril seco con tapa a rosca. No se reciben frascos de plástico o de vidrio reutilizados.	Heladera (2-8 °C)			
Médula osea	Más de 3 ml (tubo tapa lila) con EDTA como anticoagulante.	Heladera (2-8 °C)	No se reciben muestras coaguladas.		
Materia fecal	Más de 1 gramo de materia fecal si es forme o 1 ml si es diarreica en frasco nuevo estéril seco con tapa a rosca.	Heladera (2-8 °C)	No se recibe en medio de transporte.		
Lesiones cutáneas, mucosa oral o genital para inmunofluorescencia	En portaobjeto específico entregado por el Laboratorio de Virología Clínica con anterioridad al médico.	T.ambiente			

Lesiones cutáneas, mucosa oral o genital para biología molecular	Hisopo de Dacrón en tubo nuevo estéril seco con tapa a rosca.	Heladera (2-8 °C)		
Biopsia	En tubo nuevo estéril seco con tapa a rosca.	Heladera (2-8 °C)		
Hisopado Conjuntival	Hisopo de Dacrón en tubo nuevo estéril seco con tapa a rosca.	Heladera (2-8 °C)		
Hisopado de fauces y nasal	Hisopo de dacrón, rayón, poliéster o nylon con mango rígido de plástico o de aluminio, en tubo nuevo estéril seco con tapa a rosca.	Heladera (2-8 °C)		
LCR	Al menos 1ml en tubo nuevo estéril seco con tapa a rosca.	Heladera (2-8 °C)		
Líquidos de punción (líquido pleural, líquido pericárdico, etc)	Al menos 1ml en tubo nuevo estéril seco con tapa a rosca.	Heladera (2-8 °C)		
Saliva	Al menos 1ml en tubo nuevo estéril seco con tapa a rosca.	Heladera (2-8 °C)		